



Asthma Monitor



Navodila za uporabo aparata asma-1

Opravljanje meritve

1. Vstavite ustni nastavek in pritisnite gumb za vklop aparata.



2. Vpihnite 3x



= Slab vpih

3. Najboljši vpih



PEF +/- 5%; FEV1 +/- 3%

Nastavite najboljši osebni PEF

1. vklopite aparat



2. Držite in 3 sek.



3. Povečajte PEF



4. Nastavite najboljši PEF



Pritisnite za izhod

Nastavite najboljši FEV1

5. povečajte FEV1



6. nastavite najboljši FEV1



Obvestilo: Območja so nastavljene pri 80% in 50%

Pregled spomina meritev

1. vklopite aparat



2. Držite 3 sekunde
3. in za pregled spomina
4. izhod

Čiščenje spomina

1. vklopite aparat



2. Držite in 10 sek.

Nastavitev zelenega območja

1. vklopite aparat



2. Držite in 3 sek.
3. Določite zgornjo mejo z in
4. potrdite zgornjo mejo


Nastavitev ostalih območij

5. Določite spodnjo mejo z in



6. potrdite spodnjo mejo
Obvestilo: nastavljena 3 območja. Pritisnite za izhod ali za 4 območja...

7. Določite srednjo mejo z in

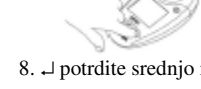

8. potrdite srednjo mejo

Nastavitev privzetih območij

1. vklopite aparat



2. Držite , in 10 sek
3. izklopite aparat

www.vitalograph.co.uk

Več informacij:
PULMODATA d.o.o.
Balantičeva 11, 1234 Mengeš
www.pulmodata.si
Tel.: 01 723 95 11



Asthma Monitor



Navodila za uporabo aparata asma-1

Opravljanje meritve

1. Vstavite ustni nastavek in pritisnite gumb za vklop aparata.



2. Vpihnite 3x



= Slab vpih

3. Najboljši vpih



PEF +/- 5%; FEV1 +/- 3%

Nastavite najboljši osebni PEF

1. vklopite aparat



2. Držite in 3 sek.



3. Povečajte PEF



4. Nastavite najboljši PEF



Pritisnite za izhod

Nastavite najboljši FEV1

5. povečajte FEV1




6. nastavite najboljši FEV1



Obvestilo: Območja so nastavljene pri 80% in 50%

Pregled spomina meritev

1. vklopite aparat

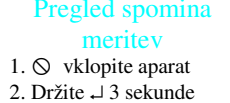

2. Držite 3 sekunde
3. in za pregled spomina
4. izhod

Čiščenje spomina

1. vklopite aparat



2. Držite in 10 sek.

Nastavitev zelenega območja

1. vklopite aparat



2. Držite in 3 sek.
3. Določite zgornjo mejo z in
4. potrdite zgornjo mejo

Nastavitev ostalih območij

5. Določite spodnjo mejo z in



6. potrdite spodnjo mejo
Obvestilo: nastavljena 3 območja. Pritisnite za izhod ali za 4 območja...

7. Določite srednjo mejo z in



8. potrdite srednjo mejo

Nastavitev privzetih območij

1. vklopite aparat



2. Držite , in 10 sek
3. izklopite aparat

Več informacij:

www.vitalograph.co.uk
PULMODATA d.o.o.
Balantičeva 11, 1234 Mengeš
T: 01/7239 511,
www.pulmodata.si