



## Vitalograph copd-6

### Odkrivanje KOPB Navodila za hiter start

#### Priprava naprave

1. Pritisnite gumb
2. Nastavite starost osebe:  
S pritskom na  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  določite starost. S  $\blacktriangledown$  potrdite.
3. Nastavite višino osebe:  
S pritskom na  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  določite višino. S  $\blacktriangledown$  potrdite.
4. Nastavite spol osebe:  
S pritskom na  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  določite spol. S  $\blacktriangledown$  potrdite.



#### Opravljanje meritve

1. Vstavite odstranljiv SafeTway ustni nastavek.



2. Merjenje
  - Globoko vdihnite in zadržite dah
  - Vstavite ustnik v usta in rahlo ugriznite vanj
  - Nato pihnite kolikor lahko 6 sekund



3. Postopek ponovite še dvakrat.  
3X



=Slab vpih



4. Pritisni  $\blacktriangle$  za prikaz najboljše meritve.

#### Rezultati meritve

##### Normalno

puščice vedno pokažejo najboljšo meritev



Negativno:  
- Spirometrija ni potrebna  
- območje KOPB zeleno

##### Možnost KOPB

puščice vedno pokažejo najboljšo meritev



Pozitivno:  
- Potrebna spirometrija  
- Območje KOPB med I in IV

##### Možnost omejitve

puščice vedno pokažejo najboljšo meritev




Nizek indeks obstrukcije:  
- Potrebna spirometrija  
- KOPB ni verjetna

#### Branje vrednosti

1. Ekran pokaže FEV1 in % optimuma  
Ekran prikaže vrednosti vsakega vpiha dokler ne pritisnete  $\blacktriangledown$  ...



2. Pritisnite  $\blacktriangle$  za prikaz FEV6, razmerja FEV1/FEV6 in % optimuma merjene osebe, ter starosti pljuč.

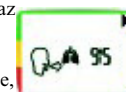


3. Za izklop pritisnite gumb  $\odot$  in držite 3 sekunde.

##### Čiščenje in dezinfekcija


Ohišje naj bo očiščeno tedensko, večkrat če je potrebno. Priporočeno čiščenje z dezinfekcijskimi robčki predvsem okoli območja ustnika.

[www.vitalograph.co.uk](http://www.vitalograph.co.uk)

[www.pulmodata.si](http://www.pulmodata.si) Tel.: 01-723 95 11

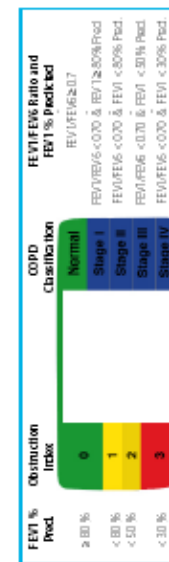

Pulmodata d.o.o.  
Profesionalna medicinska oprema  
Balanticeva 11  
1234 Mengeš

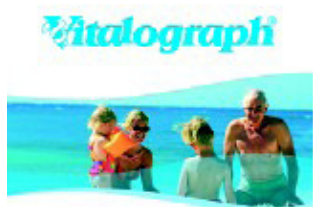

## Vitalograph copd-6

### Odkrivanje KOPB Navodila za hiter start

#### Priprava naprave

1. Pritisnite gumb
2. Nastavite starost osebe:  
S pritskom na  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  določite starost. S  $\blacktriangledown$  potrdite.
3. Nastavite višino osebe:  
S pritskom na  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  določite višino. S  $\blacktriangledown$  potrdite.
4. Nastavite spol osebe:  
S pritskom na  $\blacktriangle$  ali  $\blacktriangledown$  določite spol. S  $\blacktriangledown$  potrdite.



#### Opravljanje meritve

1. Vstavite odstranljiv SafeTway ustni nastavek.



2. Merjenje
  - Globoko vdihnite in zadržite dah
  - Vstavite ustnik v usta in rahlo ugriznite vanj
  - Nato pihnite kolikor lahko 6 sekund



3. Postopek ponovite še dvakrat.  
3X



=Slab vpih



4. Pritisni  $\blacktriangle$  za prikaz najboljše meritve.

#### Rezultati meritve

##### Normalno

puščice vedno pokažejo najboljšo meritev



Negativno:  
- Spirometrija ni potrebna  
- območje KOPB zeleno

##### Možnost KOPB

puščice vedno pokažejo najboljšo meritev



Pozitivno:  
- Potrebna spirometrija  
- Območje KOPB med I in IV

##### Možnost omejitve

puščice vedno pokažejo najboljšo meritev



Nizek indeks obstrukcije:  
- Potrebna spirometrija  
- KOPB ni verjetna

#### Branje vrednosti

1. Ekran pokaže FEV1 in % optimuma  
Ekran prikaže vrednosti vsakega vpiha dokler ne pritisnete  $\blacktriangledown$  ...



2. Pritisnite  $\blacktriangle$  za prikaz FEV6, razmerja FEV1/FEV6 in % optimuma merjene osebe, ter starosti pljuč.




3. Za izklop pritisnite gumb  $\odot$  in držite 3 sekunde.

##### Čiščenje in dezinfekcija

Ohišje naj bo očiščeno tedensko, večkrat če je potrebno. Priporočeno čiščenje z dezinfekcijskimi robčki predvsem okoli območja ustnika.

[www.vitalograph.co.uk](http://www.vitalograph.co.uk)

[www.pulmodata.si](http://www.pulmodata.si) Tel.: 01-723 95 11

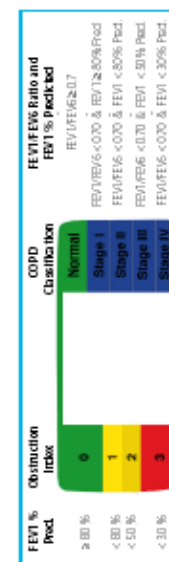

Pulmodata d.o.o.  
Profesionalna medicinska oprema  
Balanticeva 11  
1234 Mengeš